


La freccia all' interno del triangolo è un segnale di avvertimento che avvisa di una tensione pericolosa all' interno del prodotto.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK) FROM THE PRODUCT. NO USER SERVICABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO YOUR SONIC ALERT DEALER

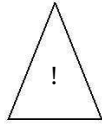

Il punto esclamativo nel triangolo è un segnale di avvertimento che vi avvisa di importanti istruzioni che accompagnano il prodotto.

ATTENZIONE: ONDE PREVENIRE SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE L' APPARECCHIO A PIOGGIA O UMIDITA'

SONIC ALERT - GARANZIA DI 1 ANNO

La sveglia Sonic Boom modello SBD375ss è garantita contro difetti di produzione di materiali e lavorazione per un 1 anno dalla data di acquisto. Entro questo periodo Sonic Alert riparerà o sostituirà a propria discrezione il SBD375ss senza addebiti per componenti e manodopera. Inviare il SBD375ss e una copia del vostro scontrino come prova di acquisto.



Sonic Alert

America's Leader in Visual Alerting Systems.

Made in China

Sonic Alert 1050 East Maple Rd. Troy, MI 48083

www.SonicAlert.com 1-800-566-3210 V/TTY



Sonic Alert

America's Leader in Visual Alerting Systems.

Sonic Boom Dual Alarm Clock con PAD Vibrazione da letto Model SBD375ss



Attenzione: Per prevenire incendi o scosse elettriche non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità. Prima di collegare alla rete, accertarsi che i requisiti specificati sull'apparecchio corrispondano alla rete di alimentazione disponibile cioè EU:220V / 60Hz.

Made in China


Sonic Alert 1050 East Maple Rd. Troy, MI 48083

www.SonicAlert.com 1-800-566-3210 V/TTY

DUAL ALARM CLOCK CON VOLUME E TONI REGOLABILI, E VIBRATORE MODEL SBD375ss

ISTRUZIONI DI OPERAZIONE

IMPORTANTE: Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservarle per eventuale riferimento futuro.

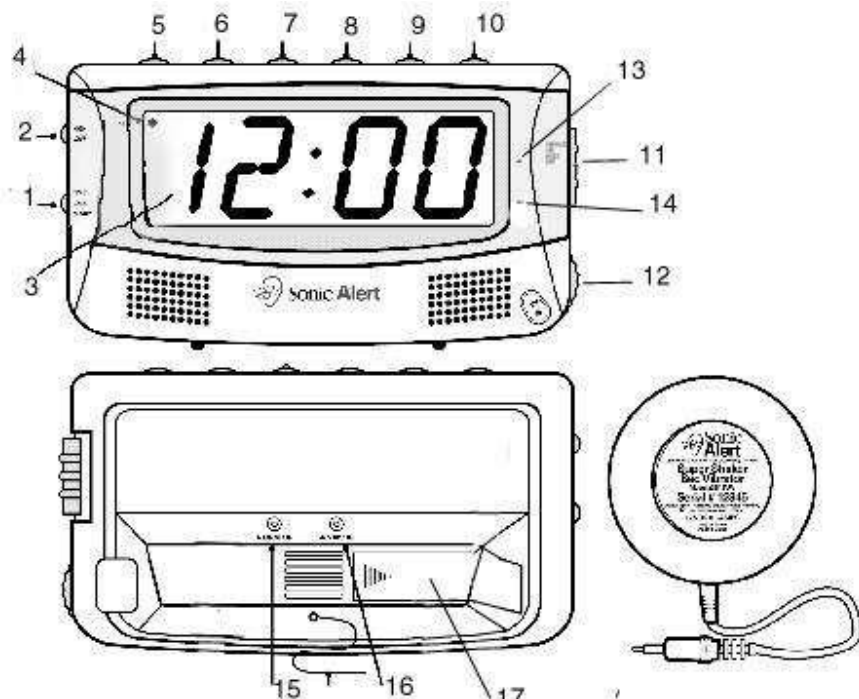

Caratteristiche illustrate sul disegno sopra:

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1) Leva "Dual Setting Switch" | 7) Pulsante SLOW Min/Ore | 13) Indicatore Alarm 1 (AL1) |
| 2) Interruttore Dimmer | 8) Pulsante Snooze | 14) Indicatore Alarm 2 (AL2) |
| 3) Display sveglia | 9) Pulsante Time Set | 15) Presa per PAD vibrazione |
| 4) Indicatore PM (12h) | 10) Rotella controllo toni | 16) Presa per Alimentatore |
| 5) Alarm SET/OFF | 11) Leva "Function Switch" | 17) Vano "Batteria di backup" |
| 6) Pulsante FAST Min/Ore | 12) Rotella controllo volume | |

DATI GENERALI

Power: Consumo: EU: AC 220V / 60Hz

Impostare l'ora corretta:

- 1) Premere il pulsante "TIME SET" (9)
- 2) Premere contemporaneamente il pulsante "FAST" (6) o "SLOW" (7) per avanzare i minuti e le ore fino al raggiungimento dell'ora desiderata
- 3) Il punto luminoso (4) localizzato nella parte alta a sinistra del display, indica che l'ora è PM, (pomeridiana). Nessun punto luminoso indicata che l'ora è AM (mattina)

Impostare l'ora della sveglia (allarme)

- 1) Per impostare AL1 spostare la "Leva di settaggio doppio allarme" (1) sulla posizione AL1. Premere "ALARM SET/OFF" (5) e allo stesso tempo premere i pulsanti "FAST" (6) o "SLOW" (7) per avanzare i minuti e le ore fino al raggiungimento dell'ora desiderata.
NOTA: quando si imposta l'ora della sveglia, se si avanza più di 24 ore il display (3) comincerà a lampeggiare e l'allarme a suonare. Per fermare il flashing, spostare la leva "FUNCTION SWITCH" (11) sulla posizione OFF.
- 3) Assicurarsi che l'ora dell'allarme sia impostata correttamente su AM o PM (4).
- 4) Una volta che l'allarme AL1 è stato impostato, spostare il "DUAL SETTING SWITCH" (1) sulla posizione AL2. Eseguire la stessa procedura utilizzata per impostare l'allarme AL1.
- 5) Una volta che AL1 e AL2 sono stati impostati, (o uno solo dei due), spostare la leva "DUAL SETTING SWITCH" (1) sulla posizione desiderata (AL1+AL2 per attivare entrambi)
- 6) Sarà possibile visualizzare, sulla destra del Display quale LED è attivo in base alla selezione effettuata AL1 (13) e AL2 (14). I Led accesi indicano che il relativo allarme è attivo.

Allarme

- 1) Per selezionare la tipologia di allarme desiderato, spostare la leva "FUNCTION SWITCH" (11) sulla posizione "VIB" per la vibrazione con PAD, "BUZZ" per la suoneria, e "VIB/BUZZ" per entrambi. NOTE: la funzione selezionata, sarà valida per entrambi gli allarmi se attivi (AL1+AL2)

Funzione Snooze

- 1) Il Pulsante "SNOOZE" (8) permette la ripetizione dell'allarme dopo 9 minuti, e può essere ripetuto fino a 54 minuti (ovvero, premuto per 6 volte)
- 2) Quando si utilizza "SNOOZE" (8) questa è indipendente sia su AL1 che su AL2.

Disattivare Allarme

- L'allarme può essere spento per la giornata, oppure disattivato permanentemente.
- 1) Premendo il pulsante "ALARM SET/OFF" (5) l'allarme viene spento per la giornata.
 - 2) Questo vale nel caso sia selezionato un solo allarme (AL1 o AL2) oppure entrambi (AL1+AL2)
 - 3) Per disattivare permanentemente l'allarme, spostare la leva "FUNCTION SWITCH" (11) sulla posizione OFF. Per riattivare la funzione di allarme, spostare la leva "FUNCTION SWITCH" (11) sulla posizione desiderata "VIB/BUZZ", "VIB", o "BUZZ"

Regolazione del Volume

- 1) Per regolare il volume, ruotare la rotella posizionata nell'angolo in basso a destra (12): numeri alti indicano maggiore potenza. (OFF: spenta, e potenza da 1 a 10)

Regolazione dei Toni

- 1) Per regolare i toni, ruotare la rotellina "TONE CONTROL" (10) posizionata sulla parte superiore destra, alla ricerca del tono desiderato.

PAD, vibratore letto

- 1) Inserire la spina Jack del Vibratore PAD nella presa posteriore "VIBRATOR INPUT" (15).
- 2) Per attivare la Vibrazione spostare la leva "FUNCTION SWITCH" (11) su "VIB" o "VIB/BUZZ"
- 3) Posizionare il PAD vibratore tra il materasso e le molle (o doghe in legno).

Batteria di backup

- 1) Per mantenere in memoria le impostazioni dell'ora e della sveglia (allarme) è possibile utilizzare una pila 9V Transistor da inserire nel vano "BATTERIA DI BACKUP" (17). La pila non è inclusa. NOTA: in caso di assenza di corrente elettrica, non sarà comunque possibile visualizzare l'ora, ma sarà comunque mantenuta l'impostazione sia dell'orario che degli allarmi.

IMPORTANTE: non confondere la presa "AC POWER INPUT" (16) con la "VIBRATOR INPUT" (15).